

## Bendaggio Effetto Freddo Mentolo e Eucalipto

Indicazioni Dal colore azzurro e dal caratteristico odore mentolato la speciale Benda in Gel monouso è imbibita di un morbido gel ed è pronta all'uso; ideale per trattare la pesantezza e i gonfiori degli arti inferiori come defaticante; per rivitalizza e rinfrescare l'epidermide tonificandola; e come attivatore della micro circolazione favorendo di conseguenza eliminazione di tossine, anche sulle zone affette dagli inestetismi cutanei della cellulite. Il prodotto vanta anche proprietà antisettiche ed astringenti caratteristiche del Tea Tree Oil.

Materiale due garze monouso da 10 metri ognuna (10 cmx 10 mt cadauna), sigillate in un unica busta di alluminio che ne garantisce lo stato umido nel tempo, 46% viscosa 54% poliammide.

Modo d'uso Arrofolare le bende formando una spirale intorno all'arto interessato, partendo dalla caviglia o dal piede salendo fino alla coscia, oppure pancia e fianchi, a seconda delle esigenze. Le garze devono essere ben aderenti al corpo ma non strette per garantire la giusta azione compressiva. Avvolgere la zona con un lenzuolino di cartene (o semplicemente con pellicola trasparente) e lasciare in posa per 40 minuti. Trascorso il tempo di posa srotolare delicatamente le bende ed effettuare un breve massaggio. Abbinare i bendaggi a sedute di pressoterapia, per amplificare ancora di più l'effetto benefico.

Avvertenze Evitare il contatto con occhi, mucose e ferite aperte. Verificare la sensibilità ai componenti presenti nella formulazione attraverso test di sensibilità cutanea. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Ingredienti: Aqua, Menthol, Polysorbate-20, Hydroxyethylcellulose, Propylene glycol, Eucalyptol, Mentha Arvensis oil, Melaleuca Viridiflora oil, Phenoxyethanol, Ci42090, Limonene, Linalool, Citronellol.



\* Per lo smaltimento verifica le disposizioni del tuo Comune

www.lamed.tech
via Monte Napoleone
820121 milano
Info@lamedicinaestetica.tech
800.287.155





RACCOLTA DIFFERENZIATA TESSUTO